

ZEUS




Gebruikershandleiding

ZSL-CX-107 Issue 09 17-08-2026

Verhogen /
multi-functie knop

Verlagen /
multi-functie knop

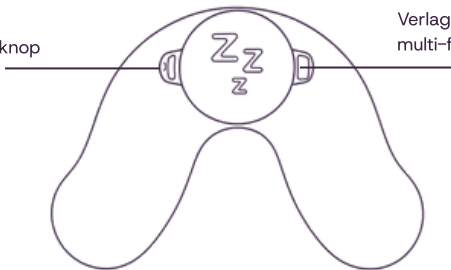


Elektrodes



Oplaadpinnen

Laadstation

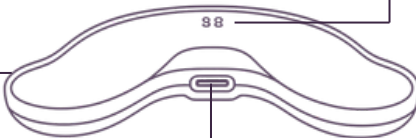

USB-C poort

Snelstartgids

Voor het eerst in gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en de gele beschermsticker.
- Laad Zeus volledig op totdat het blauwe lampje op het apparaat continu blauw brandt.

Voor het slapen

- Bevestig een nieuwe Hydrogel-pad.
- Reinig en droog de huid onder je kin.
- Plaats Zeus onder je kin (pagina 13).
- Schakel Zeus IN.
- Stel de stimulatie in op een comfortabel niveau.
- Wacht 90 seconden.
- Zeus schakelt automatisch over naar een slaapstand van 20 minuten voordat de stimulatie opnieuw begint.

In de ochtend

- Schakel Zeus UIT.
- Verwijder de Hydrogel-pad en gooi deze weg.
- Veeg de onderkant van Zeus schoon om eventuele resten te verwijderen.
- Plaats Zeus op het laadstation.

Inhoud

Waarschuwingen.....	1
Veiligheidsinstructies.....	3
Beoogd gebruik.....	4
Productbeschrijving	5
Technische gegevens.....	6

Hoe Zeus te gebruiken

Wat zit er in de doos.....	7
Voor de installatie.....	8
Zeus opladen	9
In-/uitschakelen	10
Zeus positioneren.....	13
Stimulatie instellen	15
Overzicht LED-indicatoren.....	17
Slaapstand	18

Inhoudsopgave

Gebruik Hydrogel pads

Toepassing	11
Verwijdering.....	19

Zeus onderhoud

Reinigen	20
Hergebruik.....	21
Veiligheid.....	22

Ondersteuning

FAQs	23
Ondersteuning.....	33

Algemene waarschuwingen

	Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
	Waarschuwing: Gebruik het apparaat uitsluitend op de bestemde plaats.
	Waarschuwing: Niet gebruiken tijdens het besturen van een voertuig.
	Waarschuwing: Gebruik het apparaat niet als het beschadigd lijkt.

Algemene waarschuwingen



Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat de Hydrogel-pads correct zijn aangebracht.
- Gebruik uitsluitend door Zeus goedgekeurde Hydrogel-pads.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met huidproducten, crèmes of zalven die op de huid zijn aangebracht.
- Gebruik het apparaat niet als u metalen implantaten (met uitzondering van tandvullingen) in het hoofd- of halsgebied heeft.
- Hydrogel-pads zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Herhaald gebruik kan het risico op irritatie en infecties verhogen.
- Gebruik het apparaat niet op een nat lichaam. Houd het apparaat droog. Neem geen bad of douche terwijl u het apparaat draagt.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer of in andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C-kabel.

Veiligheidsinstructies

Dit product is ontworpen om te voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Het is van essentieel belang dat u alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, contra-indicaties, opmerkingen en veiligheidsmarkeringen in dit document en op het product leest, begrijpt en strikt opvolgt.

	Waarschuwing: Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan leiden tot letsel bij de gebruiker.
	Let op: Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot schade aan dit apparaat, andere apparatuur en/of de omgeving.

Beoogd gebruik

Zeus is een apparaat voor thuisgebruik dat onder de kin wordt gedragen om snurken als gevolg van trillingen van de tong en keel te helpen verminderen.

Gezichtsbehandling

Niet geschikt voor gebruikers met gezichtsbehandling onder de kin, omdat dit een goede hechting aan de huid kan verhinderen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het apparaat geeft lichte elektrische spierstimulatie en mag niet worden gebruikt door personen met een pacemaker, hartritmestoornissen (met uitzondering van atriumfibrilleren) of aanverwante aandoeningen. (Zie de contra-indicaties op pagina 22 voor de volledige lijst. Raadpleeg bij twijfel een medisch deskundige.)

Leeftijdsgroep

Uitsluitend voor volwassenen.

Gebruiksfrequentie

Tot 8 uur per nacht.

Omgeving

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Productbeschrijving

Hoe het werkt

Zeus werkt door via een Hydrogel-pad onder uw kin lichte elektrische stimulatie toe te dienen. Terwijl u slaapt, activeert de stimulatie de spieren die helpen uw luchtweg open te houden. Door de luchtweg gedurende de nacht open te helpen houden, kan Zeus de trillingen van de tong en keel die snurken veroorzaken verminderen.

Technische gegevens

Modelnummer: ZS4

Productnaam: Zeus

DC-component: Oplaadbare lithiumbatterij van 3,6 V DC

Pulsherhalingsfrequentie: Pulsen van 2–4 kHz om de 5 seconden

Maximale amplitude: 35 V piek

Uitgangsspanning: 31 V piek / 62 V piek-tot-piek

Uitgangsimpedantie: Instelbaar in 10 niveaus

Bedrijfsomstandigheden – opladen: 0 °C tot 40 °C

Normale werking: –10 °C tot 40 °C

Luchtvochtigheid: 25%–85% RV, niet-condenserend

Hoogte: < 2000 m

Beoogde gebruiksomgeving: Thuis en in binnenomgevingen

Opslagomstandigheden: –20 °C tot 40 °C gedurende een periode van 3 maanden

Luchtvochtigheid bij opslag: 25%–85% RV, niet-condenserend

Afmetingen: 90 mm × 60 mm × 12,5 mm

Gewicht: 14 g (alleen het apparaat)

Levensduur van het product: 18 maanden bij normaal gebruik

Levensduur van de wegwerppad ZS2–P30: Eenmalig gebruik

Houdbaarheid van de wegwerppad ZS2–P30: Zie de individuele verpakking

Opladvereisten ZS4–C01:

Maximale spanning: 5 V


Minimale stroomsterkte: 75 mA

Samenstelling van de Hydrogelpad

- Verknoopt acrylamide (15–25%)
- Polyhydriche alcohol (40–60%)
- Elektrolytzouten (2–10%)
- Gedeïoniseerd water (20–40%)
- Stabilisatoren (<0,5%)

Wat zit er in de doos

- Zeus
- Laadstation
- USB-C laadkabel
- 30 Hydrogel pads
- Gebruikershandleiding

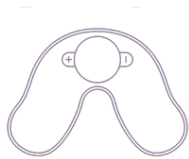

Alvorens het instellen van Zeus

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de gele sticker van de onderkant van het apparaat.
- Veeg eventuele resten voorzichtig weg met een zachte, vochtige doek.
- Sluit de USB-C-kabel aan op het laadstation.
- Plaats Zeus op het laadstation.

Zeus Opladen

Plaats Zeus op het laadstation

- Plaats Zeus na het verwijderen van de gele sticker op het laadstation.

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan

- Sluit de USB-C-kabel aan op het laadstation en gebruik uitsluitend de oplaadkabel die bij uw apparaat is meegeleverd. Gebruik een netadapter om het apparaat op te laden.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct op het laadstation is geplaatst en dat de LED blauw knippert om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

Laad Zeus vóór het eerste gebruik volledig op

- Volledig opladen duurt maximaal 4 uur.

Blauw knipperende LED = wordt opgeladen

Continu brandende blauwe LED = volledig opgeladen

Rood knipperende LED = batterij bijna leeg

In-/ uitschakelen van Zeus

Zeus INSCHAKELEN:

- Druk tegelijkertijd op de knoppen + en – om Zeus IN te schakelen.
- De LED knippert één keer rood en vervolgens groen.
- Het aantal groene knippersignalen geeft het stimulatie niveau van 1 tot 10 aan.
- Na de groene knippersignalen blijft de LED groen knipperen om aan te geven dat Zeus actief is.

Zeus LED licht



Zeus UITSCHAKELEN:

- Houd de knoppen + en – tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om Zeus UIT te schakelen.
- De LED knippert **3 keer rood**.

Aanbrengen van de Hydrogel pad

- Haal Zeus van het laadstation.
- Zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is voordat u de Hydrogel-pad aanbrengt.
- Bepaal welke zijde van de Hydrogel-pad voor het apparaat en welke voor de huid bestemd is.
- Zijde 1 – Alleen voor het ZEUS-APPARAAT
- Deze zijde heeft een lagere kleefkracht en is ontworpen om veilig aan de onderkant van het Zeus-apparaat te worden bevestigd.
- Zijde 2 – Alleen voor de HUID
- Deze zijde heeft een sterkere kleefkracht, is veilig voor gebruik op de huid en zorgt ervoor dat Zeus de hele nacht goed op zijn plaats blijft zitten.
-  **Belangrijk: Bevestig zijde 2 (de huidzijde) niet aan het Zeus-apparaat, omdat dit de elektroden kan beschadigen.**


Aanbrengen van de Hydrogel pad

- Verwijder de beschermfolie met het **label '1'** en **druk zijde 1** stevig op de onderkant van Zeus.
- Bereid de huid voor op het aanbrengen. Zorg ervoor dat de huid schoon, droog en vrij van lotions of crèmes is.
- Wanneer u klaar bent om Zeus aan te brengen, verwijdt u de plastic beschermfolie met het **label '2'** om de huidvriendelijke kleefzijde bloot te leggen.
- Plaats Zeus onder uw kin volgens de instructies voor de juiste positionering (**pagina 13**).
- **Bewaartip: Sluit de verpakking van de Hydrogel-pads onmiddellijk nadat u een pad hebt verwijderd. Zo blijven de ongebruikte pads in goede staat en voorkomt u dat ze uitdrogen.**

Positionering Zeus

- Ga voor een spiegel staan en kijk recht vooruit. Vermijd het kantelen of strekken van uw nek, zodat Zeus zo goed mogelijk past en de Hydrogel-pad optimaal aan de huid hecht.
- Plaats twee vingers onder uw kin, één aan elke kant van uw keel, en druk uw tong stevig tegen uw gehemelte.
- U zou de spieren onder uw vingers moeten voelen bewegen. Dit zijn de spieren waarboven de Zeus-elektroden (de vleugels van het apparaat) moeten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat er een Hydrogel-pad op Zeus is aangebracht voordat u het apparaat positioneert.
- Plaats het ronde middengedeelte van Zeus onder het midden van uw kin. Het is normaal als u het apparaat iets naar voren of naar achteren moet verplaatsen.
- Controleer of beide vleugels van het apparaat boven de samentrekkende spieren liggen en of de Hydrogel-pad volledig contact maakt met de huid.

Positionering Zeus

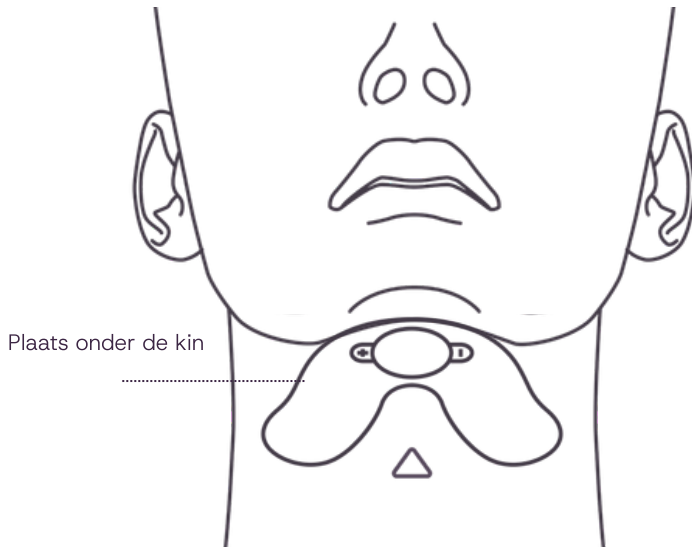

Stimulatie niveau instellen

Zeus beschikt over **10 stimulatie niveaus**, zodat u het niveau kunt kiezen dat tijdens het slapen comfortabel aanvoelt.

- Druk tegelijkertijd op **+** en **-** om **Zeus IN te schakelen**.
- Pas het stimulatie niveau aan met de knoppen **+** of **-**.
- De LED knippert rood, gevolgd door een reeks groene knippersignalen. Het aantal groene knippersignalen geeft het geselecteerde stimulatie niveau (1–10) aan.
 - **Voorbeeld: 4 groene knippersignalen = niveau 4**
- Wacht tot de LED volledig is gestopt met knipperen voordat u het stimulatie niveau opnieuw aanpast.
- Zodra u in slaap bent gevallen, geeft Zeus lichte stimulatie in **herhalende cycli van 6 seconden AAN en 4 seconden UIT** om de luchtweg open te helpen houden en snurken te verminderen.


Geheugenfunctie

Zeus onthoudt automatisch het laatst gebruikte stimulatie niveau en start de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld op hetzelfde niveau.

Stimulatie niveau instellen

Het stimulatieniveau aanpassen terwijl Zeus is ingeschakeld:

- Druk tegelijkertijd op de knoppen **+** en **-** om de modus voor het aanpassen van de stimulatie te activeren.
- De LED knippert één keer rood en vervolgens groen om aan te geven dat het apparaat klaar is om te worden ingesteld.
- Druk op de knop **+** of **-** om het stimulatieniveau te verhogen of te verlagen.
- Als er gedurende **90 seconden** geen knop wordt ingedrukt, schakelt Zeus automatisch over naar de slaapstand.

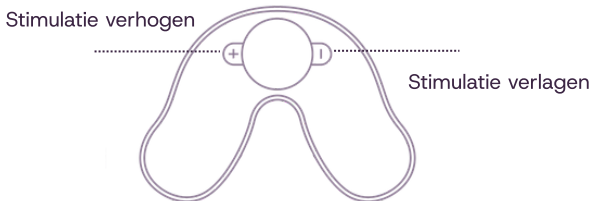

Overzicht LED indicatoren


LED kleur	Betekenis
Groen knipperen	Toestel actief
Rood – 4 x knipperen	<30 min batterijduur
Rodd – 1 x knipperen	Knopindruk gedecteerd
Groen knipperen	Nummer = stimulatie niveau
Roodd – 3 x traag knipperen	Toestel schakelt zich uit
Blauw – knipperen	Aan het opladen
Blauw – continue brandend	Volledig opgeladen
Rood - knipperen	Batterij laag

Slaapstand

- Als de knoppen **+** **of** **-** gedurende 90 seconden niet worden gebruikt, schakelt Zeus **gedurende 20 minuten** over naar de slaapstand.
- Gedurende deze periode wordt de stimulatie onderbroken, zodat u comfortabel in slaap kunt vallen.
- De groene LED stopt met knipperen en **blijft UIT**.



20-minuten
slaapstand
pause

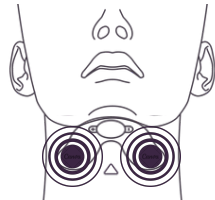

Verwijderen van Hydrogel-pad

Schakel het apparaat na gebruik UIT door de knoppen **+** en **-** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden.

Van de huid verwijderen

- Verwijder Zeus van de huid door het centrale gedeelte van het apparaat voorzichtig van uw huid weg te trekken.

Van Zeus verwijderen

- Zorg ervoor dat de lipjes van de Hydrogel-pad niet scheuren – deze maken het verwijderen gemakkelijker.
- Een transparante beschermlaag bevindt zich tussen de onderkant van Zeus en de witte kleeflaag.
- Schuif vlak naast de lipjes van de Hydrogel-pad een vinger of nagel onder de transparante laag en trek de pad voorzichtig los.
- Verwijder eventuele resten zoals aangegeven (**pagina 20**).
- **Hydrogel-pads zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.** Gooi ze op verantwoorde wijze weg.

Reiniging

- Veeg na gebruik de onderkant van Zeus schoon met een zachte, vochtige doek om eventuele lijmresten te verwijderen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of reinigingsvloeistof.
- Laat het apparaat volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw oplaadt of gebruikt.
- Zeus is niet waterdicht.
- Gebruik elke Hydrogel-pad slechts één keer.
- Open of wijzig het apparaat niet.
- De batterij is ingebouwd en kan niet door de gebruiker worden vervangen.
- **Reinig Zeus regelmatig. Ophoping van resten van de Hydrogel-pad kan de goede werking van het apparaat beïnvloeden.**

Achter gebruik

- Plaats Zeus terug op het laadstation.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct op het laadstation is geplaatst. De blauwe LED knippert om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
- Zeus onthoudt automatisch het laatst gebruikte stimulatie-niveau en start de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld op hetzelfde niveau.

Veiligheid

Gebruik Zeus niet als u:

- Een pacemaker, defibrillator of geïmplanteed medisch hulpmiddel heeft.
- Epilepsie, ernstige hartaandoeningen (bijv. hartfalen) of recent een diepe veneuze trombose (DVT) heeft gehad.
- Kanker heeft of recent operatielittekens heeft opgelopen.
- Een beschadigde, gezwollen, geïnfecteerde of geïrriteerde huid in de hals of onder de kin heeft.
- Gebruik Zeus niet in combinatie met een ander apparaat.
- Raadpleeg vóór gebruik een arts als u lijdt aan een ernstige psychische aandoening, de ziekte van Alzheimer, dementie of een andere vorm van geheugenstoornis.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als huidirritatie of ongemak optreedt.

Raadpleeg voor volledige informatie over veiligheid en contra-indicaties de volledige veiligheidsinstructies voor gebruik (IFU) op onze website.

FAQs

Hoe hoort Zeus aan te voelen?

Wanneer Zeus actief is, kunt u onder uw kin een lichte tinteling, zoemend gevoel of pulserende sensatie ervaren. Zeus beschikt over 10 stimulatie niveaus, zodat u een niveau kunt kiezen dat tijdens het slapen comfortabel aanvoelt.

U hoeft niet te verwachten dat u uw tong voelt bewegen. De stimulatie is ontworpen om zacht te zijn en te werken zonder uw slaap te verstoren, terwijl het apparaat helpt uw luchtweg open te houden.

Bij regelmatig gebruik van Zeus **kan de sensatie na verloop van tijd minder merkbaar worden of helemaal verdwijnen**. Dit komt doordat de zenuwreceptoren in uw huid zich na verloop van tijd op natuurlijke wijze aanpassen aan de stimulatie. Dit is volkomen normaal en betekent niet dat Zeus niet meer werkt of minder effectief is geworden.

FAQs

Wat moet ik doen als mijn huid geïrriteerd aanvoelt?

Bij een klein aantal gebruikers kunnen roodheid, irritatie of blaren ontstaan door de Hydrogel-pads. Dit is een bekende bijwerking van TENS-technologie, waarbij een vergelijkbare vorm van stimulatie wordt gebruikt.

Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Zeus, blijf uw huid op de gebruikelijke manier verzorgen en laat de huid volledig herstellen voordat u Zeus opnieuw gebruikt. Zodra de huid is hersteld, kunt u Zeus op een lager stimulatieniveau of om de nacht proberen te gebruiken om irritatie te verminderen en de huid voldoende tijd te geven om te herstellen. **Als de irritatie terugkeert, raadpleeg dan uw huisarts.**

FAQs

Waarom voel ik Zeus maar aan één kant?

Het is normaal dat de stimulatie aan de ene kant van uw kin sterker aanvoelt dan aan de andere kant.

Zeus maakt gebruik van een gebalanceerde bifasische golfvorm, wat betekent dat de elektrische stroom tussen beide elektroden loopt. Als u de stimulatie aan één van beide kanten voelt, werkt het apparaat correct.

U kunt een verschil in sensatie ervaren omdat:

- De anatomie van iedereen anders is. Kleine verschillen in huiddikte, spieren, vetweefsel, beharing en gevoeligheid van de zenuwen kunnen van invloed zijn op hoe de stimulatie wordt ervaren.
- De gevoeligheid van de huid varieert. Sommige mensen zijn van nature aan de ene kant gevoeliger voor elektrische stimulatie dan aan de andere kant wanneer de stroom van richting verandert.

Kies voor de beste ervaring het laagste stimulatieniveau dat comfortabel aanvoelt. De stimulatie hoeft niet sterk aan te voelen om effectief te zijn.

FAQs

Wat als de stimulatie zwakker aanvoelt of niet voelbaar is?

Zeus is ontworpen om tijdens het slapen nauwelijks merkbaar te zijn. Het is daarom niet de bedoeling dat u de stimulatiepulsen gedurende de hele nacht sterk voelt.

De anatomie en gevoeligheid verschillen van persoon tot persoon. Sommige gebruikers voelen de stimulatie sterker dan anderen, terwijl anderen deze nauwelijks opmerken. Dit is volkomen normaal.

Als u de stimulatie niet sterk voelt, betekent dit niet dat Zeus niet werkt of niet meer effectief is. Veel gebruikers raken na verloop van tijd op natuurlijke wijze gewend aan de sensatie doordat de hersenen zich eraan aanpassen.

Zolang Zeus correct is geplaatst, een nieuwe Hydrogel-pad wordt gebruikt en er goed contact met de huid is, blijft het apparaat gedurende de nacht lichte neuromusculaire stimulatie afgeven.

FAQs

Moet ik Hydrogel-pads gebruiken?

Ja. De Hydrogel-pads zijn essentieel voor een effectieve werking van Zeus. Ze zorgen voor een comfortabele pasvorm en geleiden de lichte elektrische stimulatie op een veilige manier, waardoor snurken wordt helpen verminderd.

Bij elk Zeus-apparaat wordt een voorraad Hydrogel-pads van medische kwaliteit voor 30 dagen meegeleverd.

Hydrogel-pads zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

FAQs

Vervangt Zeus CPAP?

Zeus is momenteel uitsluitend bedoeld voor het verminderen van snurken.

Wij kunnen geen medisch advies of richtlijnen geven met betrekking tot de behandeling van obstructieve slaapapneu (OSA). Wij raden u aan uw huisarts of een andere medische professional te raadplegen voordat u stopt met het gebruik van voorgeschreven medische hulpmiddelen.

FAQs

Hoe weet ik of de stimulatie op het juiste niveau is ingesteld?

Er is niet één specifiek 'juist' niveau – dit verschilt van persoon tot persoon.

Als u de stimulatie kunt voelen en deze comfortabel blijft aanvoelen, werkt Zeus effectief.

Het is niet nodig om de stimulatie op een hoge intensiteit in te stellen. Een lichte, gelijkmatige stimulatie gedurende de nacht helpt de spierspanning te behouden en snurken te verminderen.

FAQs

Wat moet ik doen als ik denk dat Zeus niet werkt?

Als u denkt dat uw Zeus niet werkt, **kunt u het apparaat met een Hydrogel-pad op uw onderarm testen.**

Bevestig de pad aan het apparaat en plaats Zeus aan de binnenkant van uw onderarm. Dit gebied is gevoeliger voor stimulatie.

Schakel Zeus in en begin met een laag stimulatieniveau. Verhoog het niveau vervolgens geleidelijk totdat u de stimulatie voelt.

Als u bij een van de instellingen een lichte pulserende of tintelende sensatie voelt, werkt het apparaat correct.

FAQs

Hoe zorg ik ervoor dat mijn Zeus-apparaat 's nachts goed op zijn plaats blijft zitten?

Een goede voorbereiding en positionering zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Zeus gedurende de nacht comfortabel en stevig op zijn plaats blijft zitten.

- Haal het Zeus-apparaat van het laadstation voordat u de Hydrogel-pad aanbrengt.
- Als er resten van de Hydrogel-pad achterblijven, reinig het apparaat dan voorzichtig met een zachte, vochtige doek. Laat Zeus volledig aan de lucht drogen voordat u een nieuwe pad aanbrengt.
- Bewaar de verpakkingen met Hydrogel-pads bij warm weer in de koelkast om te voorkomen dat de pads uitdrogen. Sluit de verpakking onmiddellijk na gebruik weer goed af.
- Bevestig zijde 1 van de Hydrogel-pad aan het apparaat en zijde 2 aan uw huid. Druk de Hydrogel-pad stevig op het apparaat.
- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is. Verwijder vóór het aanbrengen alle olie, vochtinbrengende crème, andere crèmes en huidverzorgingsproducten van de huid.
- Gezichtsbehaaring kan de hechting beïnvloeden. Zeus hecht het beste op een gladgeschoren huid of bij lichte stoppels.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct is geplaatst.

Indien nodig kan medische microporeuze tape of chirurgische tape bij sommige gebruikers extra ondersteuning bieden om Zeus gedurende de nacht stevig op zijn plaats te houden.

FAQs

Moet ik Zeus elke dag opladen?

Voor optimale prestaties raden we aan uw Zeus-apparaat na elk gebruik op te laden, zodat de batterij voldoende is opgeladen voor een volledige nachtrust.

Ondersteuning

Wilt u met een van onze teamleden spreken?

Ons supportteam helpt u graag verder via support@zeussleeps.com.

Supportcentrum:

Vind meer hulpmiddelen, informatie en tips op:

www.zeussleeps.com

Adres:

**Unit 17 Petersfield Business Park
Petersfield
Hampshire
Verenigd Koninkrijk
GU32 3QA**

IFU

Om de volledige veiligheidshandleiding te downloaden, scant u de onderstaande QR-code:



Verwijdering

Gooi dit apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Voer het af in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de Britse regelgeving SI 2013/3113.





Sleep. Refreshed.

www.zeussleeps.com