

FLOWTENS

LEAD THE FLOW


Neurostimulation Tibiale Postérieure Transcutanée




Mise en place de FLOWTENS

Flowtens s'utilise au choix :
· soit le **patch**
· soit avec la **chevillère**


Flowtens avec le patch

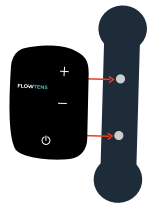

Clipsez le stimulateur sur la face extérieure

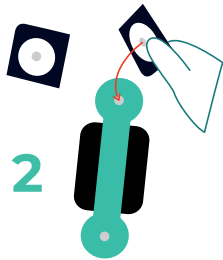

Clipsez les électrodes puis retirez le film de protection

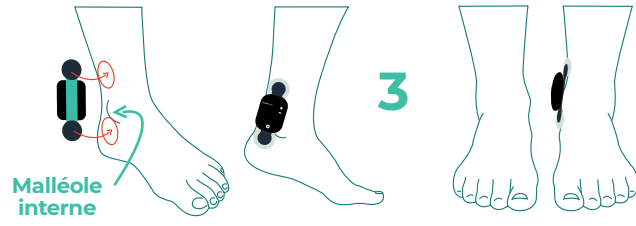


Positionnez le patch en arrière et en dessous de la malléole interne (le positionnement peut se faire sur votre jambe droite ou gauche selon votre choix)

Flowtens avec la chevillère




Clipsez le stimulateur sur la face extérieure

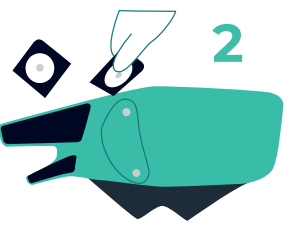


Clipsez les électrodes à l'intérieur puis retirez le film




Vérifiez la chevillère
R : Pied droit
L : Pied Gauche

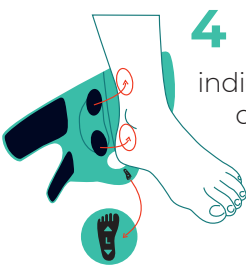

Positionnez le pied. Les zones en rouge indiquent le positionnement optimal des électrodes lors de la fermeture de la chevillère

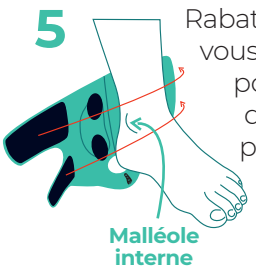

Rabattez les scratches en vous assurant du bon positionnement des électrodes par rapport à la malléole interne

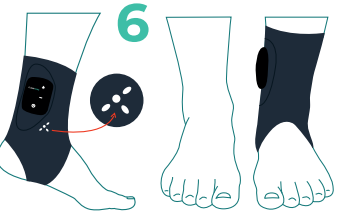

Cet indicateur doit se trouver sur votre malléole interne

Application smartphone



Personnalisable & programmable




Digitale & connectée



Simple & ergonomique



Références

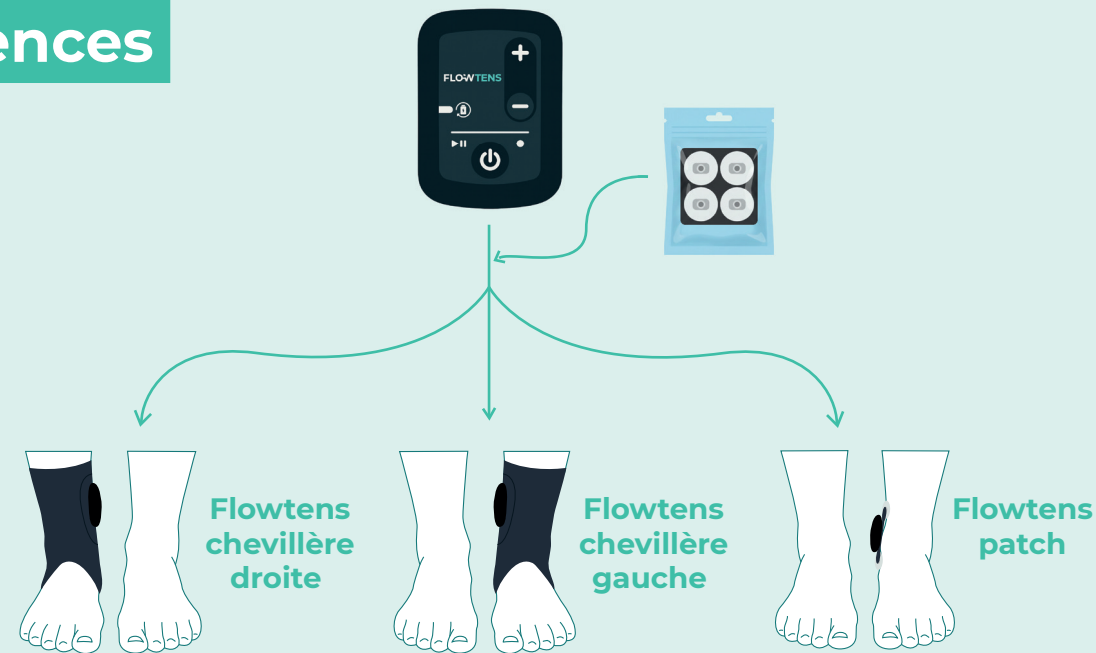

	Dénomination	Réf	GTIN
	Stimulateur* (livré avec une boîte de transport et un câble de recharge)	FLO-02-201	3770025687049
	Chevillère droite x1	FLO-02-108-R	3770025687025
	Chevillère gauche x1	FLO-02-108-L	3770025687032
	Patch x1	FLO-02-109	3770025687094
	Electrodes auto-adhésives**	SAE-SC050000 WP-VT	 (01)04719872332183 (11)YYMMDD (10)YYWW
	Boîte de transport	FLO-07-103	3770025687100
	Câble de recharge	FLO-05-101	3770025687056

*Code 1111701 - LOCATION HEBDOMADAIRE
Code 6163358 - ACHAT d'un dispositif Flowtens
**Code 6154951 ou forfait annuel code 1183014

Programmes disponibles



Programme 10Hz

20 10 200
min Hz μ s



Programme 14Hz

20 14 210
min Hz μ s



Programme 20Hz

20 20 200
min Hz μ s



Programme 25Hz

20 25 210
min Hz μ s



Programme 5Hz

20 5 210
min Hz μ s



Programme libre

0 à 0 à 0 à
120 50 600
min Hz μ s
(code d'accès : 1234)

Courant de sortie (ajustable) :
0 à 50mA* (+/-5% de la valeur max)
* Sur résistance 1000 Ohm (+/-10%)

Largeur d'impulsion (ajustable) :
50 à 600 μ s (+/-10%)

Fréquence d'impulsion (ajustable) :
1 à 50Hz (+/-10%)

Durée du programme (ajustable) :
1 à 120min

Consommation en fonctionnement :
< 0.1W

Alimentation :
Batterie rechargeable
Lithium-ion Polymer 3.7V

Caractéristiques RF :
· Bluetooth® LE : 2400-2483.5 MHz (ISM)
· Modulation : GFSK
· Puissance émission : -4.7 dBm
· Espacement et nombre de canaux :
1 MHz, 40 canaux
· Type d'antenne :
Céramique gain 0.5 dBi

Dimensions :
60 mm x 44 mm x 18 mm

Masse :
30g

Service client :

- Pour passer commande :
order@flowtens.com
- Pour toute question ou réclamation :
contact@flowtens.com
Tél : 09 78 45 27 74

www.flowtens.com

Conçu, fabriqué et distribué par FlowStim
Technology, France
Pôle Economique - 1010 Av de l'Europe
33260 La Teste de Buch

Importeur:

Glano BV
Rootputte 15
9090 Merelbeke-Melle
Belgique
Tel+32 9 2736958
info@glano.be
www.glano.be